


### Spaarstand





### Pompbediening

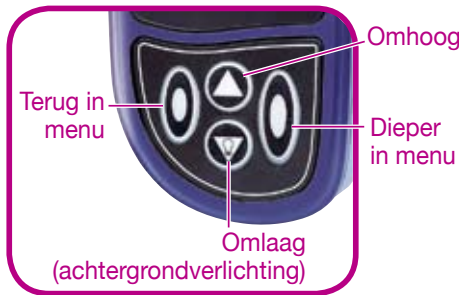

## Starten van infusie met de Cozmo® Insulinepomp

### Het reservoir vullen

Vul het reservoir volgens de gebruiksaanwijzingen die bij het reservoir zijn geleverd. **Gebruik altijd een aseptische techniek.**

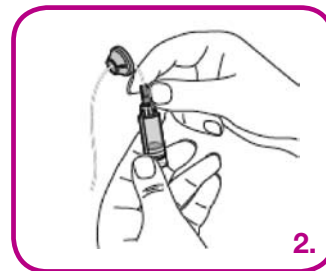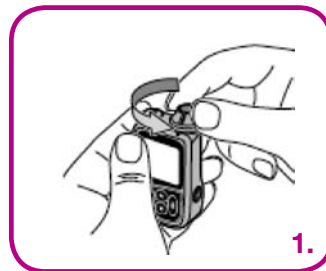

### Jouw Insuline Pomp

Voor een uitgebreide uitleg over de Cozmo® Insulinepomp verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing

#### FIGUUR 1

##### Openen van de reservoirkap (en verwijderen van leeg reservoir)

Draai het reservoirkapje ongeveer één kwartslag naar links en verwijder deze van de pomp. Verwijder, indien nodig, het lege reservoir.

**TIP:** U kunt de waarschuwing "Reservoir verwijderd" krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.

#### FIGUUR 2


##### Een infuusset bevestigen

Draai de lijn van de infuusset op het reservoirkapje. Verwijder het beschermkapje van de infuusset en maak deze stevig vast aan de luer-lock aansluiting van het reservoir.

#### FIGUUR 3

##### Plaatsen van een reservoir

Plaats het nieuwe reservoir in de reservoirkamer. Draai het reservoir voorzichtig ongeveer één kwartslag naar rechts zonder druk uit te oefenen op het reservoir. Het reservoir is nu op de duwstaaf bevestigd. Het laadprogramma op de pomp kan nu gestart worden.

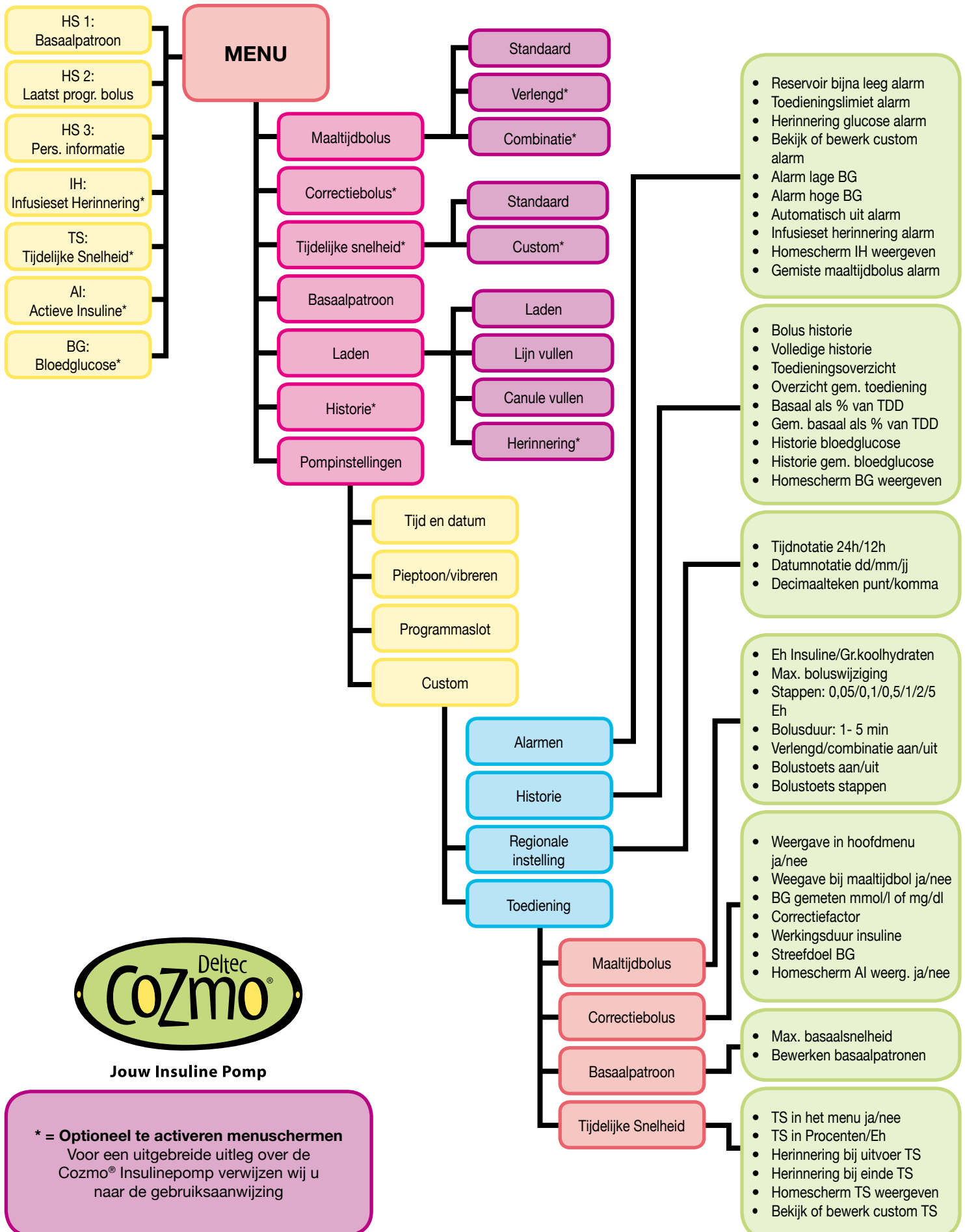

Jouw Insuline Pomp

\* = **Optioneel te activeren menuschermen**  
Voor een uitgebreide uitleg over de Cozmo® Insulinepomp verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing